

GEBRAUCHSINFORMATION – Bitte sorgfältig lesen!

Akustika® Holiday - gut geschützt und doch hören

Geben Sie Ihrem Ohr die Vorsorge, die es braucht.

Die Ohrschutzkombination für die Reise!

1 Kombi-Packung enthält:

Akustika® Windschutzwolle für ca. 12 Stück Ohrpropfen

Vorbeugend – das kälteempfindliche Ohr wird geschützt.

Zur Anwendung von Akustika® Windschutzwolle entnimmt man eine etwa erbsengroße Menge und formt diese durch Drehen zu einem Ohrstöpsel, den man unter sanftem Druck in den Gehörgang einführt. Nach Gebrauch mit den Fingerspitzen herausziehen. Keine spitzen Gegenstände verwenden!

- Bewährte Spezialwolle vom Schaf – keinerlei Reizung.
- Unauffällig – hautfarben durch Färbung mit Lebensmittelfarbstoff E 110, 123
- Hochelastisch – kein Druckgefühl im Ohr.
- Kein Feuchtigkeitsfilm im Gehörgang – Entlüftung des Ohres bleibt gewährleistet.
- Schalldurchlässig – ideal für Freizeit, Sport und Urlaub.
- geeignet für Kinder ab 2 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.
- Wohltuend – Körperwärme wird gespeichert, Kälte, Wind und kalte Außenluft werden wie durch einen Filter abgeschirmt.
- Praktisch – für jede Ohrgröße individuell zu portionieren.

4 Stück Lärmschutzstöpsel (€)

Der äußere Gehörgang ist in natürlicher Weise unterschiedlich ausgebildet und bildet den Abschluss des Hörorgans nach außen, wobei er sich im Laufe des Lebens auch ändert.

Ohrstopfen aus Schaumstoff passen sich dem Gehörgang sanft an und durch eine sorgsame Anwendung vermeidet man unangenehme Druckschmerzen beim Tragen.


Lärmschutzstöpsel längsseitig vor dem Einsetzen zwischen den Fingern rollen und zusammengedrückt halten. Den zusammengedrückten Stöpsel in den Gehörgang einsetzen und ca. 8 Sekunden andrücken. Gegebenenfalls das Ohr mit der anderen Hand zum besseren Einführen des Stöpsels ein wenig nach oben ziehen.

- Polyurethan, hautverträglich, PVC-frei
- hygienisch und waschbar (bei max. 30°C)
- SNR: 35 dB (SNR bedeutet: Durchschnittliche Dämmung in Dezibel)
- Freizeit, Sport, Urlaub, Disko und Hobbywerken
- geeignet für Heranwachsende ab 12 Jahren und Erwachsene.
- Vorbeugend – das empfindliche Ohr wird vor Lärmeinwirkung geschützt.

Hinweis:

Bei Überempfindlichkeit, Verletzungen oder Entzündungen des Gehörganges oder des Trommelfelles ist vor Gebrauch von Akustika® Holiday der Arzt oder Apotheker zu befragen. Wegen der Gefahr des Verschluckens sind Ohrstöpsel für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Zum Öffnen der Akustika® Kunststoffdose wird die Dose zwischen Daumen und Zeigefinger an der Ober- und Unterseite leicht ange-drückt, sodass der Verschluss nach vorne ohne Spannung hochgeklappt werden kann. Nach der Entnahme die Dose wieder verschließen. Inhalt der Dose vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

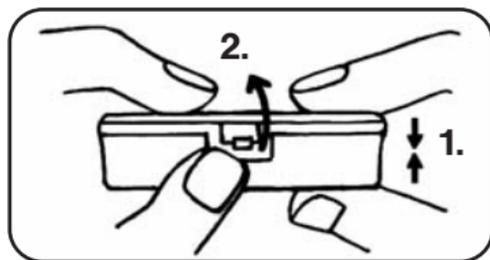

1. leicht zusammendrücken
2. Verschluss nach vorne klappen und öffnen

Weitere Informationen unter www.suedmedica.de. Stand: 03/2012

® = registrierte Marke Akustika