



# LIDHYGIENE-TÜCHER

## Medizinprodukt CE

**Vorbefeuchtete Einweg-Augentücher aus weichem Bambusvlies mit Hyaluronsäure und Malve zur Reinigung und Pflege der Augenpartie. Ohne Duftstoffe. Auch für Babys geeignet.**

Die mit Lotion getränkten Bambusvlies-Tücher reinigen die Augen sanft. Eventuelle Krusten und Augensekret werden aufgeweicht und können daher leichter entfernt werden. Hyaluronsäure und Malve beruhigen und pflegen die gereizte Augenpartie und helfen, den physiologischen Zustand des Auges wiederherzustellen. Die Tücher können auch als warme oder kalte Kompressen für die Augen verwendet werden.

### → ZUR REINIGUNG, LINDERUNG UND BEFEUCHTUNG DER AUGENPARTIE

INHALT	WIRKUNG
Hyaluronsäure	Beruhigt, spendet Feuchtigkeit und pflegt
Malve	Lindert und beruhigt

## ANWENDUNG

Die Hände sorgfältig waschen. Das Tuch aus der Verpackung nehmen und vollständig auffalten. Dann das Tuch einmal zusammenlegen und damit sanft über das Lid und die Wimpern streichen.

Um Sekrete leichter zu entfernen: Den geschlossenen Beutel in warmem Wasser (40 °C) 3 Minuten lang erwärmen; dann das lauwarmer Tuch als Komresse auf das geschlossene Auge legen. Anschließend die Augen geschlossen halten und die Augenpartie mit dem Tuch vorsichtig massieren, um Sekrete sanft zu entfernen.

Bei geschwollenen oder juckenden Augen und Augenlidern: Den geschlossenen Beutel ca. 2 Stunden lang im Kühlschrank kühlen und dann das Tuch als abschwellende Komresse einige Minuten lang auf das geschlossene Auge legen.

## SCHLÜSSELWÖRTER

- SANFTE REINIGUNG, OHNE DUFTSTOFFE, OHNE KONSERVIERUNGSSTOFFE
- AUS BIOLOGISCH ABBAUBAREM UND KOMPOSTIERBAREM BAMBUSVLIES
- AUCH FÜR BABYS

## FOKUS

### AUGENHYGIENE

**Augenhygiene** ist von **grundlegender Bedeutung** für die Gesundheit der Augen - und zwar nicht nur, wenn Augenerkrankungen vorliegen. Der Grund hierfür ist, dass die Augen leicht mit Erregern in Kontakt kommen können. Hinzu kommt, dass bei häufiger Sekretion die Ziliardrüsen verstopfen, was zu einer Ansammlung von organischen Substanzen auf dem Augenlid und den Lid- und Wimpernrändern führen kann. Die Pflege der Augen durch eine angemessene Augenhygiene bringt zahlreiche Vorteile mit sich und verringert das Risiko von Erkrankungen, da Staub, allergieauslösende Stoffe und Krankheitserreger entfernt werden.

Für eine gründliche **Augenhygiene** ist das Waschen mit Wasser und speziellen Reinigungsprodukten oder die Verwendung von Augenpads nicht immer ausreichend und kann in manchen Fällen sogar zu Augenreizungen führen. Es ist also ratsam, **spezielle Einweg-Tücher** zu verwenden, die **steril sind und keine Stoffe enthalten, welche die Augen und die Augenpartie reizen können**.

Bei **Säuglingen und Kindern** ist eine sorgfältige Augenhygiene besonders wichtig, um eventuelle **Sekrete von den Augenlidern und Wimpern zu entfernen**, die Reizungen und Entzündungen verursachen können.

Menschen mit **Augenerkrankungen wie Bindehautentzündung, Lidrandentzündung, Hagelkorn und Gerstenkorn** sollten spezielle Produkte verwenden, um eine angemessene Augenhygiene zu gewährleisten.

Patienten, die sich einer **Augenoperation** unterziehen, müssen darauf achten, dass sie ihre Augen vorher und nachher mit sterilen Einweg-Tüchern reinigen.

## FORMEL (INHALTSSTOFFE)

AQUA (DEIONIZED WATER), HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, POTASSIUM GLYCYRRHIZINATE, SODIUM HYALURONATE, MALLOW (MALVA SYLVESTRIS) EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, GLYCERIN, LAURETH-9, CETYL PALMITATE, CETEARETH-12, CETEARETH-20, DISODIUM EDTA, -CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, GLUCAMINE, O-CY MEN-5-OL, CARBOMER.



24 biologisch abbaubare und kompostierbare Tücher aus Bambusfasern

· ENTFERNUNG VON LIDSEKRETEN

· ENTZÜNDUNG UND/ODER INFEKTION

· ALLERGIEN UND BINDEHAUTENTZÜNDUNGEN

· VOR UND NACH AUGENOPERATIONEN

### GEEIGNET:

Schwangerschaft



Stillzeit



Säuglinge und Kinder



Erwachsene



Senioren



- ✓ OHNE Konservierungsstoffe mit Allergierisiko
- ✓ OHNE Duftstoffe

# LIDHYGIENE-TÜCHER

Medizinprodukt CE

## BESONDERHEITEN DER FORMEL

### → BAMBUSVLIES

Die Bambusfaser ist eine regenerierte Zellulosefaser, die aus dem Zellstoff von Bambus gewonnen wird. Aus dieser Faser lässt sich ein natürliches Vlies herstellen, das **biologisch abbaubar, kompostierbar, leicht, robust, antibakteriell, natürlich desinfizierend und absolut hypoallergen** ist.



### → AKTIVSTOFFE MIT BERUHIGENDER UND FEUCHTIGKEITSSPENDENDER WIRKUNG



**Hyaluronsäure** ist eine nicht sensibilisierende Verbindung, die nicht nur **besonders hautverträglich** ist und **lindernde Eigenschaften** besitzt, sondern auch eine hohe hygroskopische Kraft hat, d.h. sie besitzt die Fähigkeit, Wasser anzuziehen. Es handelt sich um ein Molekül, das von Natur aus im menschlichen Bindegewebe vorhanden ist. Es hat eine **benetzende Wirkung** und verbessert die Hydratation des gereizten Bereichs.

**Malve** sorgt dank der aus ihren Blüten und Früchten gewonnenen Schleimstoffe für eine **sanfte Reinigung und eine lindernde und beruhigende Wirkung**, die ideal für die Augen und die Augenpartie ist.

## ZU EMPFEHLEN

- ZUR GRÜNDLICHEN, ABER ZUGLEICH SCHONENDEN REINIGUNG DES AUGES.
- FÜR DIE TÄGLICHE AUGENHYGIENE AUCH BEI SEHR KLEINEN KINDERN.
- FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG BEI MENSCHEN, DIE ZU EINER GEREIZTEN AUGENPARTIE NEIGEN.
- BEI INFEKTIONEN UND AUGENBESCHWERDEN SOWIE REIZUNGEN DURCH STAUB, STRESS, POLLEN UND BEI AUGENENTZÜNDUNGEN (LIDRANDENTZÜNDUNG, BINDEHAUTENTZÜNDUNG, HAGELKORN, GERSTENKORN).
- ZUM SANFTEN AUFWEICHEN UND ENTFERNEN VON KRUSTEN.
- ZUR VORBEREITUNG AUF EINE AUGENOPERATION UND ZUR REINIGUNG DES AUGES NACH DER OPERATION.
- NACH DEM ABSCHMINKEN.

Die hier genannten Informationen sollen und können nicht den Rat des Arztes ersetzen, der für etwaige Verordnungen und therapeutische Indikationen verantwortlich ist. Diese Informationen sind ausschließlich für Fachkräfte in den Bereichen Medizin, Ernährung und Pharmazie bestimmt (Art. 6 Absatz II des ital. G.v.D. III vom 27.01.1992) und dürfen gemäß den Verordnungen EG/1924/2006 und EG/432/2012 in keiner Weise verbreitet werden.